

使用说明书

【产品名称】 活性加强型骨修复材料

【结构与组成】 主要成分为猪真皮细胞外基质和无机钙盐

【产品特点】

1. 采用脱细胞猪真皮基质为原料，为骨细胞生长提供良好的支架和细胞生长微环境，有利于骨细胞合成并分泌胶原纤维及有机质，具有优良的骨传导性、骨诱导性和成骨性；
2. 浸润0.9%生理盐水，以湿态提供，保留大量活性成分，具有细胞再生诱导性。
3. 富含钙盐成分，能够促进骨细胞增殖分化，发生类骨质的钙化，有利于骨组织的形成，并提升骨密度；
4. 来源于天然组织，具有良好的生物相容性和生物可降解性；
5. 经辐照灭菌后以无菌方式提供，一次性使用。

【适用范围】

1. 动物骨科：适用于陈旧性骨折、粉碎性骨折、感染性骨折（感染控制后）、血供较差部位骨折的骨修复。
2. 动物牙科：空隙/拔牙窝填充、牙周袋/其他骨丢失、齿裂修复、囊肿/其他骨质缺损等。

【使用方法】

1. 使用本品时必须遵守无菌操作和治疗的基本原则；
2. 确认包装完整，产品在有效期内方可使用，确认后撕开产品首层包装备用；
3. 按照常规无菌手术要求对目标部位进行消毒、清创；
4. 打开产品包装，将 Vegragt™ Plus 装填于在目标部位，如目标部位供血不足，可添加适量生理盐水或自体血液；
5. 封闭创口。

【注意事项】

1. 使用前阅读说明书；
2. 本品经辐照灭菌，为无菌制品，应严格无菌操作；
3. 本品仅供一次性使用，不得二次灭菌使用；
4. 无菌包装破损，禁止使用；
5. 有效期以外的产品不得使用；
6. 本品仅供兽用，需由专业兽医使用；
7. 本品应用于承重部位时须与固定器械配合使用。

【符号解释】



不得二次使用
Do not re-use



经辐照灭菌
Sterilized by irradiation



参考使用说明书
Consult instructions for use



不得二次灭菌
Do not re-sterilize



包装破损切勿使用
Do not use if package is damaged



制造商
Manufacturer



生产日期
Date of manufacture

LOT

批次代码
Batch code



怕晒
Keep away from sunlight



警告
Caution



有效期
Use by date

REF

产品编号
Catalog number



怕雨
Keep dry

【禁忌症】

- 1.手术区有急/慢性感染未得到控制时禁用;
- 2.未治疗的恶性骨癌患者禁用。

【规格型号】

I 型: 10mm*20mm*6mm 约 1.2CC

II 型: 20mm*20mm*6mm 约 2.4CC

【包装】 双层无菌包装。

【存储、运输】 干燥环境下常温储存、运输。

生产日期及批号: 见标签

有效期: 36 个月

产品所有企业: HELEMED LLC

受托生产企业: 杭州华迈医疗器械有限公司

生产地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 2 幢 107 室

电话: 0571-86078695

邮编: 310000

如有问题可与企业联系。